

Инструкция по медицинскому применению медицинского изделия Лилайз Роза

Название медицинского изделия

Лилайз Роза, свечи ректальные, 5мг, №10

Состав

Одна вагинальная свеча содержит:

натрия гиалуронат 5,90 мг (эквивалентно кислоте гиалуроновой 5,00 мг), твердый жир, масляный экстракт центеллы азиатской, жирорастворимый экстракт алоэ, масляный экстракт календулы, масло чайного дерева, бутилированный гидрокситолуол, пропилпарагидроксibenзоат, изобутилпарагидроксibenзоат, бутилпарагидроксibenзоат.

Описание медицинского изделия

Медицинское изделие для одноразового использования.

Свечи белого или почти белого цвета без запаха.

Область применения

Гиалуроновая кислота является природным биополимером. Это линейный полисахарид с уникальными физическими и биохимическими свойствами, такими как вязкость, упругость и способность связывать молекулы воды. Гиалуроновая кислота способствует миграции клеток, участвующих в процессе заживления и восстановлению поврежденных тканей, способствует гидратации тканей, содействуя восстановлению и росту эпителиальных клеток, является фактором поддержки для быстрого восстановления слизистой влагалища.

Лилайз Роза применяется:

- для облегчения заживления слизистой влагалища после родов, хирургических операций во влагалище, после прижигания эрозий, при дистрофии слизистой влагалища после химиотерапии, ионизирующего излучения лазером

- при постменопаузальной сухости влагалища, эстрогенной недостаточности вследствие естественной менопаузы или менопаузы вызванной медицинским вмешательством (гистерэктомия, овариоэктомии), после длительного применения кортикостероидов.

Способ применения

Интравагинально. Перед введением необходимо вымыть руки, освободить вагинальные свечи (разрезав ножницами упаковку). Вводить вагинальные свечи глубоко во влагалище. Если вагинальные свечи слишком мягкие, необходимо предварительно охладить их в холодильнике в течение нескольких минут или подержать под холодной водой (до извлечения их из пластиковой упаковки). Обычная дозировка составляет одна вагинальная

свеча в день, вечером перед сном (или согласно указаниям врача). Нельзя принимать внутрь. Свечи могут вводиться непосредственно пациентом или медицинским работником (в том числе лицом, оказывающим уход).

Побочные действия

Серьезные побочные эффекты не отмечались.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам медицинского изделия.

Особые указания

Длительное применение средства, предназначенного для местного использования, может вызвать симптомы гиперчувствительности, в этом случае необходимо прекратить лечение и проконсультироваться с врачом. Избегайте контакта с глазами.

Беременность и лактация.

В связи недостаточным опытом применения при беременности, вагинальные свечи необходимо применять только по рекомендации врача.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами.

Не влияет на способность пациента к управлению автотранспортным средством или потенциально опасными механизмами.

Передозировка

Не отмечались.

Форма выпуска и упаковка

По 5 вагинальных свечей в контурную ячейковую упаковку из поливинилхлорида и полиэтилена.

По 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению на казахском и русском языках помещают в картонную пачку.

Условия хранения

Хранить в сухом, прохладном месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения

3 года

Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Производитель

Sprey Medical Ltd., Лондон, Великобритания

Производственная площадка:

HELP S.A., Атика, Греция

Уполномоченный представитель производителя:

ТОО «СЕРПHEUS Medical» (ЦЕФЕЙ Медикал),

ул. Панфилова 98, БЦ «OLD SQUARE»,

Алматы, Республика Казахстан

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции (товара)

ТОО «Сerpheus Medical» (Цефей Медикал), 050000, РК, г. Алматы, ул. Панфилова 98, БЦ «OLD SQUARE», офис 807.

тел: +7 (727) 300 69 71, e-mail: serpheusmedical@gmail.com

